



BEDIENUNGS- / WARTUNGSANLEITUNG

TRAGSTUHL

SED001 (2 Räder)

SED004 (4 Räder)

1. Allgemeine Hinweise

- Für eine korrekte Verwendung des Geräts beachten Sie bitte dieses Handbuch.
- Das Produkt darf ausschließlich von qualifiziertem Personal verwendet werden.
- Prüfen Sie bei Lieferung, ob das Produkt unversehrt ist, und lagern Sie es verpackt fern von Wärmequellen.
- Die Lebensdauer des Geräts wird durch den Verschleiß nicht reparierbarer oder austauschbarer Teile bestimmt.
- Trocken lagern.
- Achten Sie stets auf die Anwesenheit von Kindern.

2. Vor jedem Gebrauch

- Überprüfen Sie stets den Verschleißzustand der Teile, um die sichere Nutzung des Geräts für Personen und Gegenstände zu gewährleisten.

3. Hinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie bei Bedarf die Sicherheitsgurte.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Robustheit des Produkts. Bei Schäden sofort ersetzen.
- Nicht bei Patienten verwenden, deren Gewicht die angegebene Belastungsgrenze überschreitet.
- Bei Zweifeln zur Verwendung und Wartung wenden Sie sich an den Händler.
- Halten Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem von PVS SPA bereitgestellten Medizinprodukt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.



4. Gebrauchsanweisung

- Stuhl öffnen (SED001 mit 2 Rädern – SED004 mit 4 Rädern).
 - Patient korrekt auf den Stuhl setzen (SED001 mit 2 Rädern – SED004 mit 4 Rädern).
 - Verwenden Sie die vorgesehenen Gurte zur Sicherung des Patienten.
 - Dank der Griffe kann der Patient aus verschiedenen Richtungen angehoben werden (SED001 mit 2 Rädern – SED004 mit 4 Rädern).
 - Maximale Belastbarkeit des Stuhls (SED001 mit 2 Rädern – SED004 mit 4 Rädern): 150 kg.
-

5. Maße (SED001 mit 2 Rädern – SED004 mit 4 Rädern)

- Geöffneter Stuhl: 910 mm (H) x 520 mm (B) x 710 mm (T)
 - Geschlossener Stuhl: 910 mm (H) x 520 mm (B) x 195 mm (T)
 - Gewicht: 8,5 kg
-

6. Wartung

Die Geräte werden bei der Markteinführung sorgfältig geprüft. Im Reparaturfall dürfen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwendet werden.

7. Reinigung und Desinfektion

Verwenden Sie Wasser und ein nicht aggressives Desinfektionsmittel. Trocknen Sie das Gerät fern von direktem Sonnenlicht.

Vermeiden Sie unbedingt die Verwendung von säure- oder laugenhaltigen Produkten oder Lösungsmitteln wie Aceton oder Verdünner.

8. Entsorgungsbedingungen

Das Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Empfohlen wird die Entsorgung über kommunale Recyclinghöfe für die vorgesehene Wiederverwertung der Materialien.

9. Garantie

Das Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten gegen Herstellungsfehler.

Es wird erklärt, dass das Gerät der Verordnung MDR 745/2017 über Medizinprodukte entspricht.