

Bedienungsanleitung: Dönges Patientenhülle SuperThermo

Dönges Patientenhülle SuperThermo

Pflegeanleitung & Hinweise

Die Hülle besteht aus einem Bezug aus Polyurethan beschichtetem Polyester und einer Füllung aus 100 % Polyesterfasern, die perfekt häufigen Waschvorgängen standhält.

Der Bezug hält sämtlichen Flüssigkeiten stand. Er ist atmungsaktiv und mit Silberionen behandelt. Dank der molekularen Struktur der Beschichtung, ermöglicht dies den Luftaustausch.

Die Reinigungsfrequenz hängt von dem Zustand der Hülle ab. Die Verwendung der Dönges Patientenhülle SuperThermo ermöglicht eine deutliche Reduzierung des Wäschevolumens.

Maschinelle Reinigung:

Die Patientenhülle kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln (ohne Chlor) gewaschen werden. Die empfohlene Menge an Waschmittel und Desinfektionsmittel beachten.

Die Waschtemperatur darf 95°C nicht überschreiten. Bei dem Reinigungszyklus ist das Schleudern bei 1.000 Umdrehungen/Minute wichtig.

Wichtiger Hinweis: Kein Chlor oder chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt darf nicht sterilisiert werden. Es dürfen keine Weichspüler verwendet werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit gefärbten Produkten.

Trockner:

Zwischen 60 °C und 90 °C mindestens 45 Minuten im Trockner trocknen.

WICHTIG: Das Wasser kann durch kleine Mikrorisse in das Innere der Hülle eindringen. Nur die Hitze des Trockners ermöglicht es, das Wasser aus der Hülle zu entfernen. Nicht bügeln.

Achtung :

Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Lieferumfangs. Sie enthält wichtige Hinweise zur Wartung und zum Gebrauch dieses Produktes. Bewahren Sie diese deshalb gut auf und geben Sie diese bei einem Besitzerwechsel unbedingt an den neuen Eigentümer weiter.

Wichtige Hinweise: Vor der Benutzung der Dönges Patientenhülle muss diese Bedienungsanleitung unbedingt vollständig gelesen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Benutzung oder Missachtung dieser Hinweise entstehen, keine Haftung übernehmen. Eine Verwendung im Einsatz darf erst erfolgen, wenn sich die Benutzer mit der richtigen und sicheren Handhabung vertraut gemacht haben. Wir empfehlen, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Rettungsgeräts regelmäßig zu üben, um im Einsatzfall ein absolut sicheres Handling zu gewährleisten. Die gezeigten Anwendungsmöglichkeiten stellen keinerlei medizinische Empfehlungen dar!

Lieferumfang:

Überprüfen Sie sofort nach Erhalt den Lieferumfang. Fehlende Teile müssen innerhalb einer Woche nach Erhalt reklamiert werden. Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt. Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- 1 Patientenhülle
- 1 Bedienungsanleitung

Gewährleistung

Wir garantieren die Mängelfreiheit des von uns gelieferten Produktes innerhalb der gesetzlichen Fristen. Eine Erfüllung dieser Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatz der defekten Patientenhülle. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit

der Übergabe an den Kunden. Als Nachweis dient der Lieferschein oder die Rechnung des Lieferanten. Die Gewährleistung beschränkt sich ausdrücklich auf Ersatz oder Reparatur des defekten Produktes. Etwaige Folgeschäden sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Jegliche Änderungen oder Reparaturen einer nicht von uns bevollmächtigten Stelle, führen zum sofortigen Wegfall sämtlicher Gewährleistungsansprüche.

Kundendienst

Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur durch von uns zertifizierte Servicestellen erfolgen.

Sollten Sie Ersatz- oder Zubehörteile benötigen, verwenden Sie nur von uns freigegebene Teile. Bei Bestellung geben Sie unbedingt die Seriennummer des Produktes an.

Achtung:

Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen oder Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör, können zu einer tödlichen Gefahr für Anwender oder der zu rettenden Person führen!

Technische Daten

Material:	Polyurethan beschichtetes Polyester
Einlage:	Polyesterfasern
Farbe außen:	dunkelblau
Farbe Patientenseite:	hellblau
Abmessung:	150 x 220 cm
Gewicht:	2.000 g
Feuerwiderstandsklasse:	M1

Anhang:

Produktempfehlungen zur Oberflächendesinfizierung/
Reinigung der bakteriostatischen Patientenhülle :
Bode Chemie

Als gebrauchsfertige Produkte:

Bacillol AF
Bacillol 30 Foam
Mikrobac Virucidal Tissues
Dismozon plus 0.4% (Hinweis: Produktrückstände mit Wasser entfernen)

Als zu verdünnende Produkte:

Mikrobac forte 0.5%
Kohrsolin FF 0.5%
Schülke & Mayr GmbH
mikrozid sensitive liquid
mikrozid sensitive wipes

Flächendesinfektionsmittel-Konzentrat pursept AF
oder antisept AF N

 **DÖNGES**
WIR HABEN DAS ZEUG!

DÖNGES GmbH & Co. KG

Jägerwald 11
D-42897 Remscheid

Fon +49 (0) 21 91/56 26-180
Fax +49 (0) 21 91/56 26 26-180

info@doenges-rs.de
www.doenges-rs.de