

# Bedienungsanleitung:

Dönges Patientenschutzdecke mit Sichtschutzfenster

Patientenschutzdecke zum Schutz des Patienten vor Splintern, Glas und Staub.  
Besteht aus wasserabweisendem, sowie abrieb- und reißfestem Stoff.  
In praktischer Transporttasche verpackt.

**Pflegeanleitung & Hinweise:**

Die Decke besteht aus einem Bezug aus mit Polyurethan beschichtetem Polyester und einer Füllung aus 100% Polyesterfasern, die perfekt den häufigen Waschvorgängen standhält.

Der Bezug hält sämtlichen Flüssigkeiten stand. Er ist atmungsaktiv und mit Silberionen behandelt. Dank der molekularen Struktur der Beschichtung, ermöglicht dies den Luftaustausch.

Die Reinigungsfrequenz hängt von dem Zustand der Decke ab.

**Maschinelle Reinigung:**

Die Patientenschutzdecke kann mit den üblichen

Reinigungsmitteln (ohne Chlor) gewaschen werden.  
Die empfohlene Menge an Waschmittel und Desinfektionsmittel beachten.  
Die Waschtemperatur darf 95°C nicht überschreiten. Bei dem Reinigungszyklus ist das Schleudern bei 1000 Umdrehungen/Minute wichtig.

**Wichtiger Hinweis:**

Das Sichtschutzfenster nicht mitwaschen, ausschließlich Wischdesinfizieren.

**Wichtiger Hinweis:**

Kein Chlor oder chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt darf nicht Sterilisiert werden. Es dürfen keine Weichspüler verwendet werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit gefärbten Produkten.

**Trocknung:**

Zwischen 60°C und 90°C mindestens 45 Minuten im Trockner trocknen.

**WICHTIG:**

Das Wasser kann durch kleine Mikrorisse in das Innere der Decke eindringen. Nur die Hitze des Trockners ermöglicht es, das Wasser aus der Decke zu entfernen. Nicht bügeln.

**Achtung:**

Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Lieferumfangs. Sie enthält wichtige Hinweise zur Wartung und zum Gebrauch dieses Produktes. Bewahren Sie diese deshalb gut auf und geben Sie diese bei einem Besitzerwechsel unbedingt an den neuen Eigentümer weiter.

**Wichtige Hinweise:**

Vor der Benutzung der Dönges Patientenschutzdecke mit Sichtfenster muss diese Bedienungsanleitung unbedingt vollständig gelesen werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Benutzung oder Missachtung dieser Hinweise entstehen, keine Haftung übernehmen. Eine Verwendung im Einsatz darf erst erfolgen, wenn sich die Benutzer mit der richtigen und sicheren Handhabung vertraut gemacht haben.

Wir empfehlen, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Rettungsgeräts regelmäßig zu üben, um im Einsatzfall ein absolut sicheres Handling zu gewährleisten. Die gezeigten Anwendungsmöglichkeiten stellen keinerlei medizinische Empfehlungen dar!

**Lieferumfang:**

Überprüfen Sie sofort nach Erhalt den Lieferumfang. Fehlende Teile müssen innerhalb einer Woche nach Erhalt reklamiert werden. Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt. Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten.

- 1 Patientenschutzdecke
- 1 Sichtfenster
- 1 Transporttasche
- 1 Bedienungsanleitung

**Gewährleistung:**

Wir garantieren die Mängelfreiheit des von uns gelieferten Produktes innerhalb der gesetzlichen Fristen.

Eine Erfüllung dieser

Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatz der defekten

Patientenschutzdecke mit Sichtfenster. Die

Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe an den Kunden. Als Nachweis dient der Lieferschein oder die Rechnung des Lieferanten.

Gewährleistung beschränkt sich ausdrücklich auf Ersatz oder Reparatur des defekten Produkts.

Etwaige Folgeschäden sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Jegliche Änderungen oder Reparaturen einer nicht von uns bevollmächtigten Stelle führen zum sofortigen Wegfall sämtlicher Gewährleistungsansprüche.

**Kundendienst:**

Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur durch von uns zertifizierten Servicestellen erfolgen.

**Achtung:**

Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen oder Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör können zu einer tödlichen Gefahr für Anwender oder der zu rettenden Person führen!

Sollten Sie Ersatz- oder Zubehörteile benötigen, verwenden Sie nur von uns freigegebene Teile. Bei Bestellung geben Sie unbedingt die Seriennummer des Produktes an. Zubehör und Ersatzteile erhalten Sie von:

Dönges GmbH & Co. KG  
Jägerwald 11  
42897 Remscheid  
Telefon: 02191 / 5626-0  
Fax: 02191 / 5626-199  
Internet: [www.doenges-rs.de](http://www.doenges-rs.de)  
e-mail: [info@doenges-rs.de](mailto:info@doenges-rs.de)

Technische Daten:

Material: Polyesterfasern

Material Sichtfenster:

PVC 50x50 cm

Farbe außen: rot

Abmessung: 120x200 cm

Gewicht: 1.000 g

Feuerwiderstandsklasse: CRIP5



**DÖNGES GmbH & Co. KG**

Jägerwald 11  
D-42897 Remscheid

Tel. +49 2191 5626-112

Mail: [feuerwehr@doenges-rs.de](mailto:feuerwehr@doenges-rs.de)

[www.doenges-rs.de](http://www.doenges-rs.de)